


OMRON M2 Basic tlakomjer za nadlakticu

Upute za uporabu



Pregled

- A: Prikaz
- B: Tipka [START/STOP]
- C: Pretinac za baterije
- D: Priključak za AC adapter
- E: Zračna utičnica
- F: Manžeta za ruku
- G: Zračni utikač
- H: Zračna cijev
- I: Marker

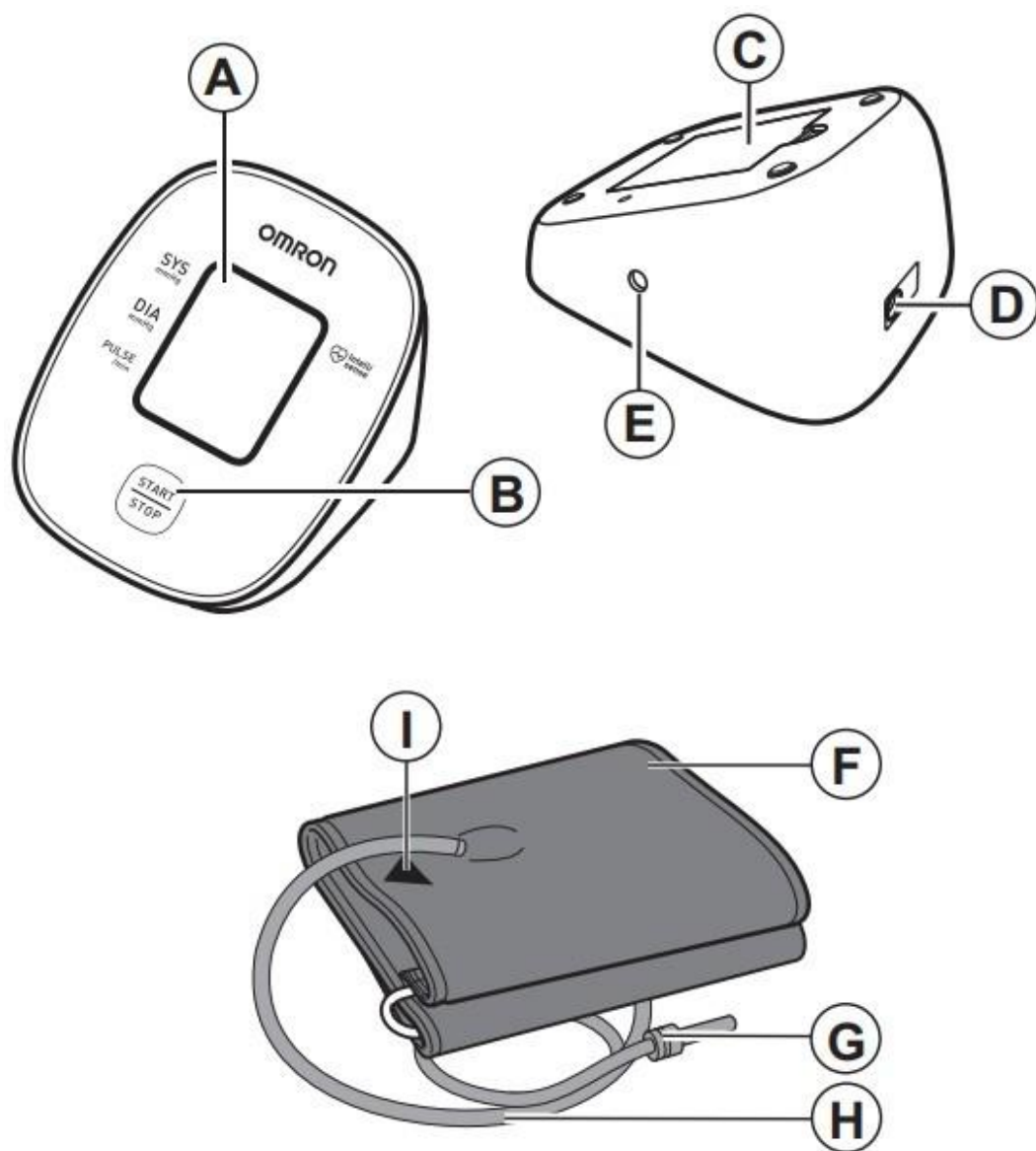

Opis simbola



Primijenjeni dio - Tip BF Stupanj zaštite od električnog udara (struja curenja)



Oprema klase II.

IP XX Stupanj zaštite od prodora prema IEC 60529



CE oznaka



Serijski broj



Broj LOT-a



Medicinski uređaj



Ograničenje temperature



Ograničenje vlažnosti



Ograničenje atmosferskog tlaka



Indikacija polariteta konektora



Isključivo za unutarnju upotrebu



OMRON-ova zaštićena tehnologija za mjerenje krvnog tlaka. Identifikator



manžeta kompatibilnih s uređajem.



Pokazatelj položaja manžete za lijevu ruku



ART.



Oznaka na manžeti koja se postavlja iznad arterije

INDEX



Pokazivač raspona i položaj poravnanja brahijalne arterije



Pokazatelj raspona opsega ruke za pomoć pri odabiru ispravne veličine manžete

QUALITY
PASS



Oznaka kontrole kvalitete proizvođača

LATEX FREE

nije napravljeno od prirodnog lateksa kaučuka



Opseg ruke



Nužnost da korisnik konzultira ovaj priručnik s uputama



Korisnik se mora strogo pridržavati ovog priručnika s uputama radi vlastite sigurnosti.




Istosmjerna struja

 Izmjenična struja



Zabranjena radnja

Sadržaj paketa

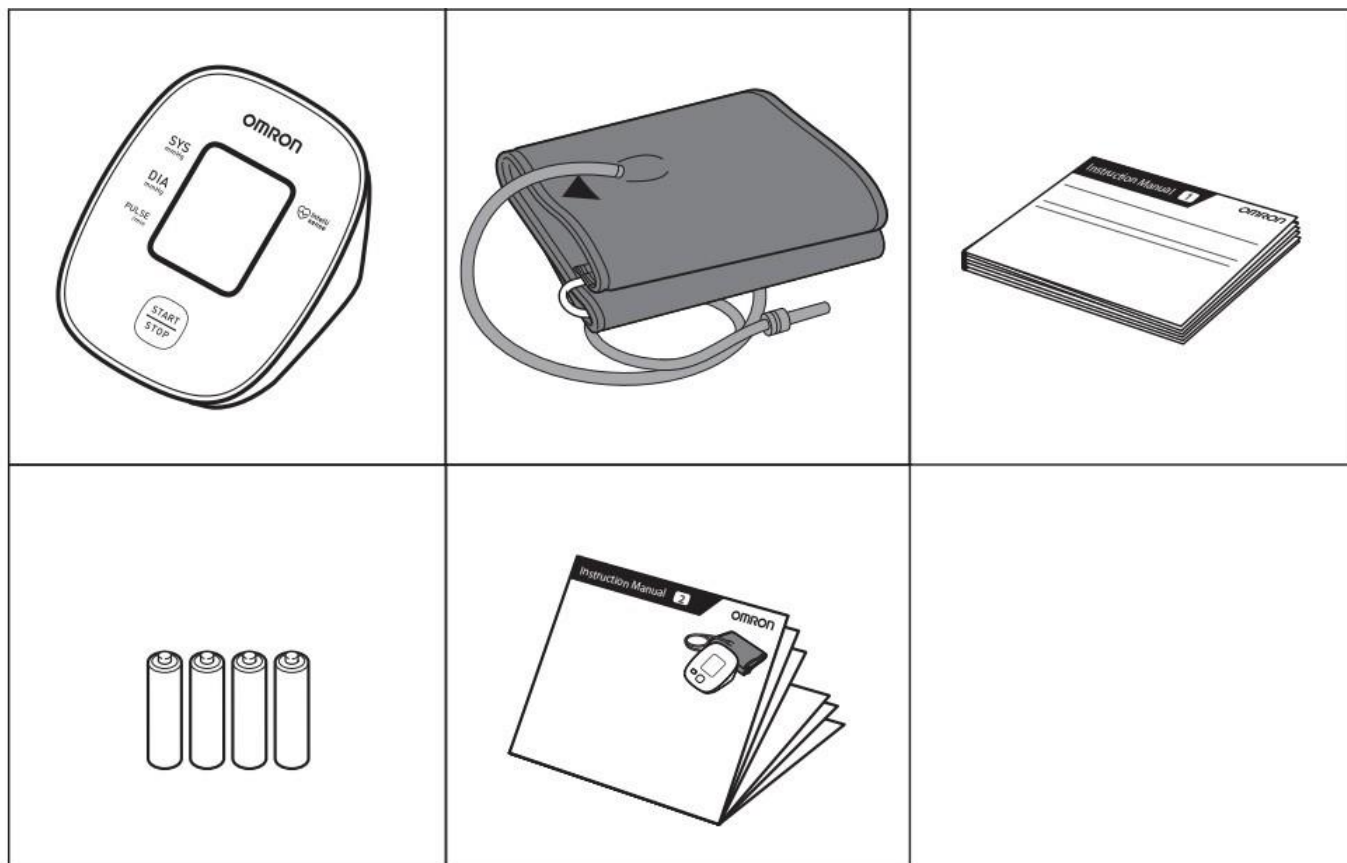



Priprema za mjerenje

30 minuta prije



5 minuta prije: Opustite se i odmorite.






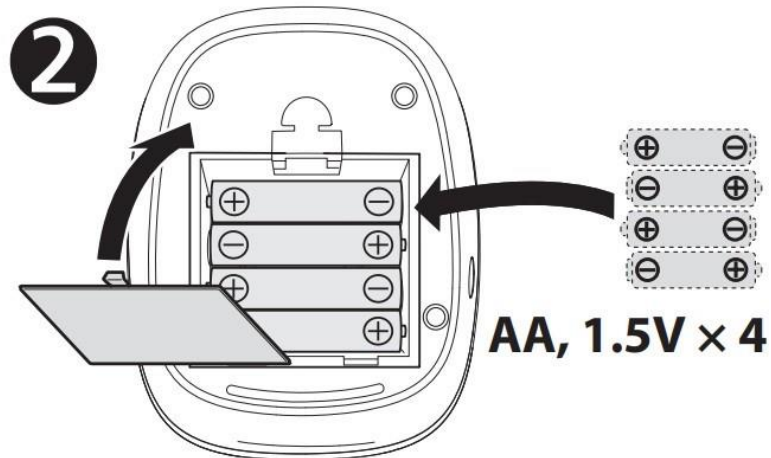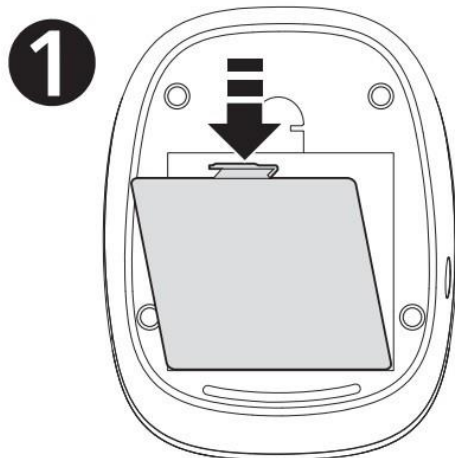

Stavljanje manžete na lijevu ruku


A: Cijevna strana manžete treba biti 1 – 2 cm iznad unutarnje strane lakta.

B: Provjerite je li cijev za zrak s unutarnje strane vaše ruke i čvrsto omotajte manžetu kako se više ne bi mogla savijati.

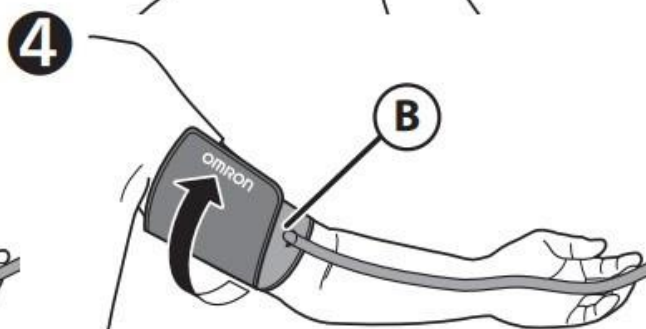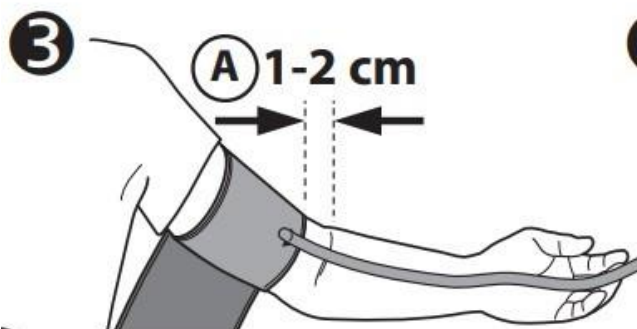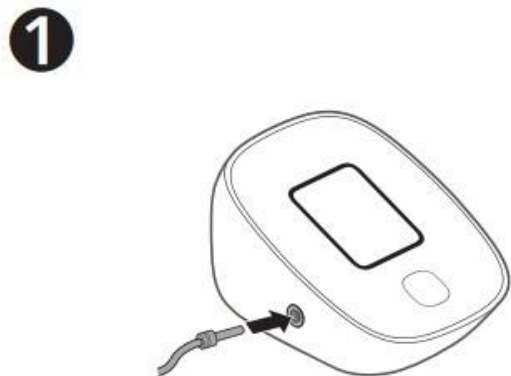


Pravilno sjedenje

1. Udobno se smjestite s osloncem na leđa i ruke
2. Postavite manžetnu za ruku u istu razinu kao i vaše srce.
3. Držite stopala ravno, noge neprekrizene, ostanite mirni i ne govorite.

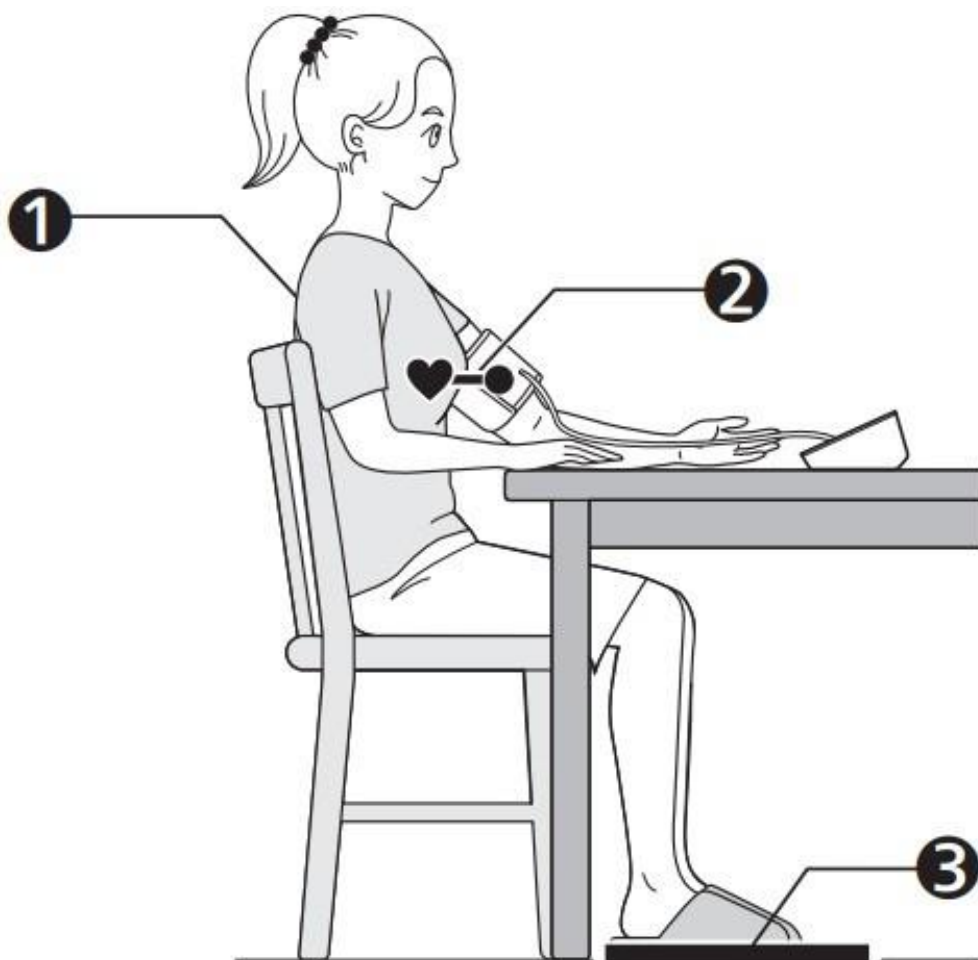


Mjerenje

Kada se pritisne tipka [START/STOP], mjerenje se automatski izvodi i sprema.

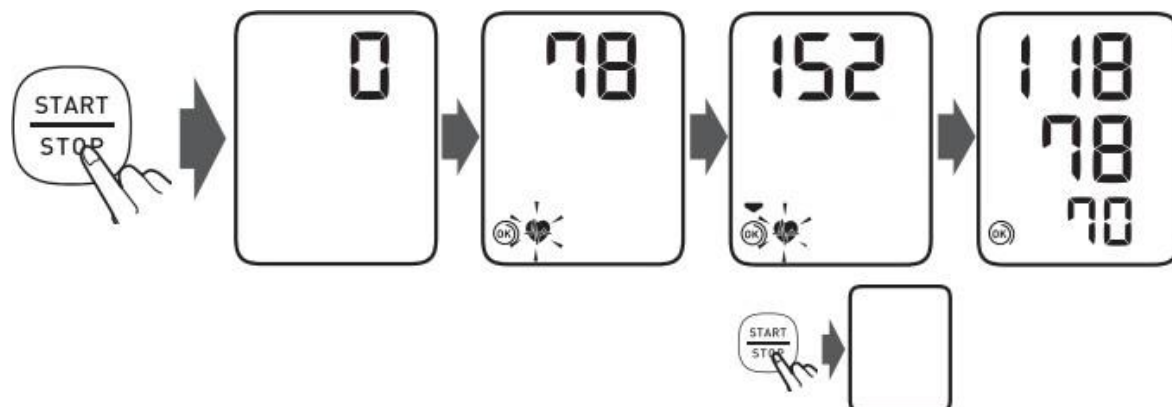

Provjera očitavanja

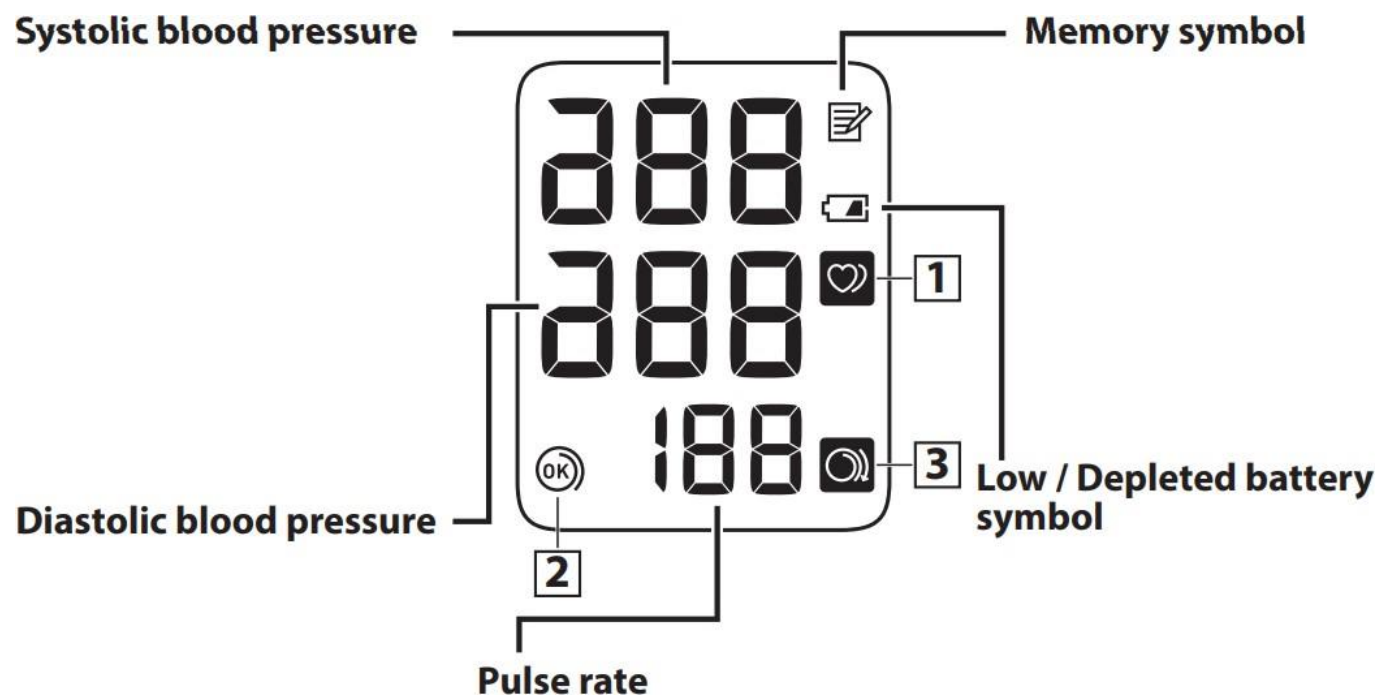

1. Pojavljuje se kada se tijekom mjerenja otkrije nepravilan ritam*.



Ako se ponavlja, OM RON preporučuje da se obratite svom liječniku.

2. Manžeta je dovoljno čvrsta.




3. Ponovno ČVRSTO pričvrstite manžetu



Nepravilan ritam srca definira se kao ritam koji je 25% manji ili 25% veći od prosječnog ritma detektiranog tijekom mjerenja.


Korištenje memorijskih funkcija

Očitavanje pohranjeno u memoriji

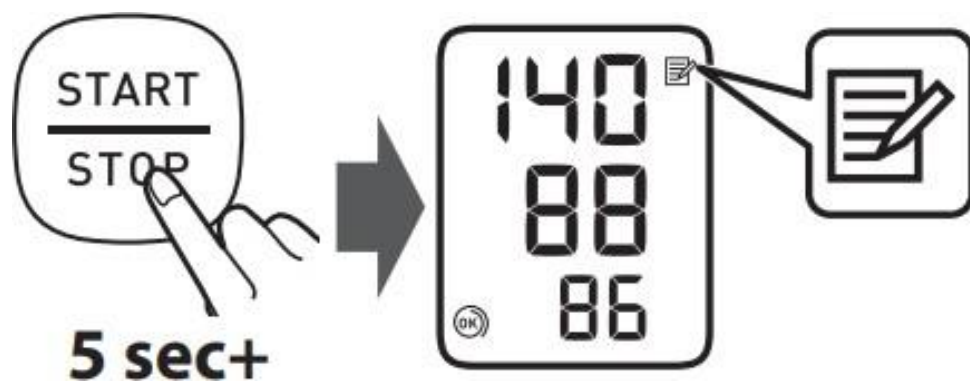

Vaše posljednje očitavanje je pohranjeno.

Brisanje svih očitavanja

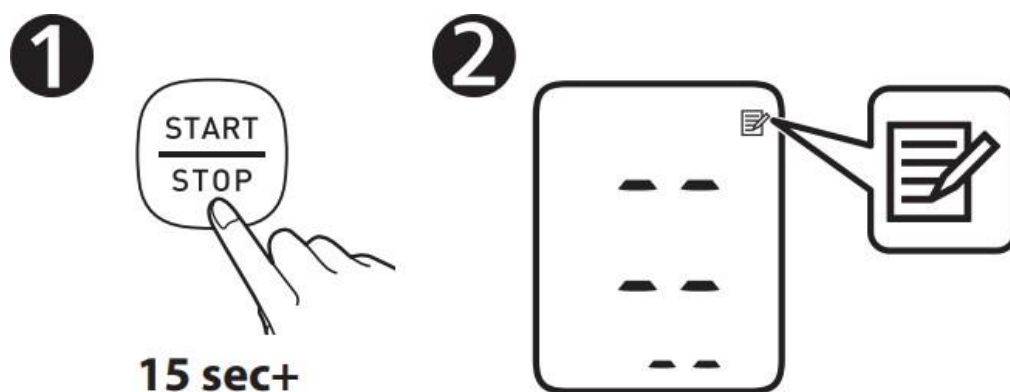

Dodatni medicinski pribor

Manžeta za ruku



(HEM-RML31)
22 - 42 cm




(HEM-CS24)
17 - 22 cm



(HEM-CR24)
22 - 32 cm


AC adapter

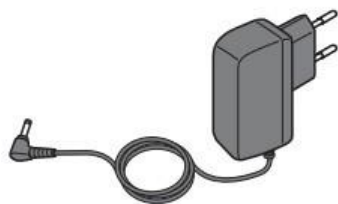

(HHP-CM01)



(HHP-BFH01)

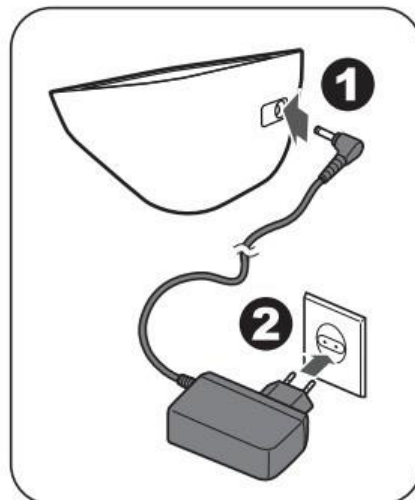

Podrška



Proizvođač



Predstavnik EU-a

OMRON HEALTHCARE d.o.o.

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.

No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vjetnam

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.com